

Microbolome 1.0 – A7130M



Instrucțiuni de recoltare

Kitul de recoltare conține:

1 x Formular de recoltare

1 x Instrucțiuni de recoltare

1 x Flacon pentru recoltare cu capac maro și cu spatulă atașată (2 în cazul în care efectuați testul suplimentar Malabsorbție, Maldigestie, Imunitate intestinală)

1x Flacon pentru recoltare cu etichetă albă și capac galben (OmicSnap tube)

1x Flacon pentru recoltare cu etichetă albastră și capac galben (OmicSnapMeta tube)

2 x Hârtie colectoare pentru proba de scaun

3 x Recipiente albe pentru transport (4 în cazul în care efectuați testul suplimentar Malabsorbție, Maldigestie, Imunitate intestinală)

Nu faceți **schimbări extreme în dietă** în zilele dinaintea recoltării – mâncați normal.


- Pentru a evita contactul scaunului cu apa vă rugăm să folosiți **hârtia colectoare** inclusă în kit.
- Folosiți spatula de plastic pentru a recolta proba și a umple flaconul. Spatula nu trebuie să intre în contact cu toaleta în momentul recoltării. Detergenții și soluțiile de dezinfectare pot afecta rezultatele.
- După recoltare înșurubați capacele bine și puneți flacoanele în tuburile de transport.
- Proba de scaun trebuie păstrată la rece (în frigider) până la sosirea curierului.
- Curierul va transporta proba la temperatură ambientală.
- Nu expediați probe în weekend; vă recomandăm să programați expedierea probei pentru zilele de **LUNI, MARȚI sau MIERCURI**.
- Completați formularul de recoltare specificând medicul prescriptor și puneți-l în cutie. **BIFAȚI PE FORMULAR NUMAI TESTELE PE CARE LE-AȚI ACHITAT SAU CARE V-AU FOST BIFATE DE CĂTRE MEDICUL PERSCRIPTOR**. Vă informăm că pentru orice test bifat și neachitat veți primi rezultatele numai după achitarea testului.
- **PĂSTRAȚI CUTIA KITULUI PENTRU TRANSPORTUL PROBEI LA LABORATOR.**

Instrucțiuni de recoltare și transport a probei de scaun

RECOLTAREA PROBEI


1. Flacon pentru recoltare cu capac maro (cu spatulă atașată):

- Fixați hârtia colectoare pe capacul vasului de toaletă. Așezați-vă pentru a colecta proba de scaun. Proba nu trebuie să se amestece cu urină sau apă.
- Deșurubați capacul maro. Cu ajutorul spatulei de plastic atașate de capac, recoltați din mai multe locuri.
- Umpleți flaconul până la jumătatea intervalului minim-maxim. Nu depășiți nivelul maxim!
- Reînșurubați cu atenție capacul flaconului.
- Scrieți numele, data nașterii și data recoltării pe flacon și puneți-l în recipientul de transport inclus în kit (alb).
- În cazul în care efectuați testul suplimentar Malabsorbție, Maldigestie, Imunitate intestinală, repetați procedura pentru al doilea flacon inclus în kit.

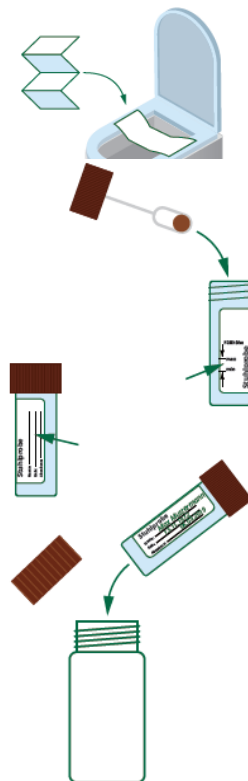


1. Flacoane cu capac galben – OmicSnap și OmicSnapMeta*


- Așezați flaconul OmicSnap (etichetă albă) în poziție verticală, pentru a preveni scurgerea lichidului. Desfășurați capacul galben în sens invers acelor de ceasornic și scoateți tija. **IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ NU DESCHIDEȚI CAPACUL ALB.**
- Introduceți tija în patru locuri diferite din scaun, până când aceasta este plină. Vă rugăm să NU umpleți suplimentar flaconul OmicSnap (etichetă albă) cu ajutorul tije. Cantitatea prelevată conform instrucțiunilor este suficientă.
- Îndepărtați excesul de probă de pe partea superioară a tije, folosind un șervețel.

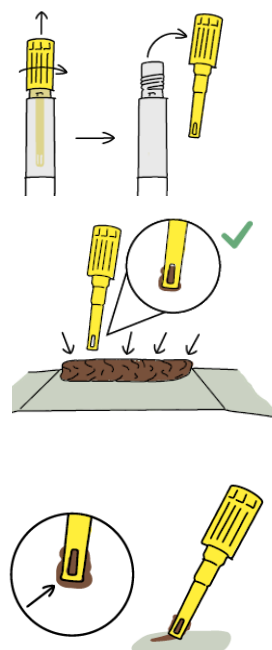

- Reintroduceți tija în flaconul OmicSnap (etichetă albă) și înșurubați bine capacul galben (până simțiți rezistență și nu mai poate fi deschis).

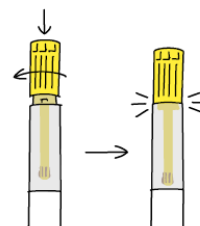

- Rotiți ușor flaconul OmicSnap (etichetă albă), de câteva ori, înainte și înapoi. Vă rugăm să NU agitați!

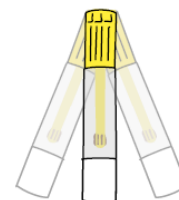


- Puneți flaconul OmicSnap (etichetă albă) în recipientul de transport inclus în kit (alb).



- Repetați procedura de recoltare pentru flaconul OmicSnapMeta (etichetă albastră) parcurgând aceiași pași ca la OmicSnap (etichetă albă).
- Recipientele de transport care conțin probele prelevate, împreună cu formularul de recoltare trebuie puse în punga de transport probe biologice. Sigilați punga, puneți-o în cutia de transport a kitului de recoltare și închideți cutia.

*Informații despre dispozitivul medical OmicSnap Tube și OmicSnapMeta Tube

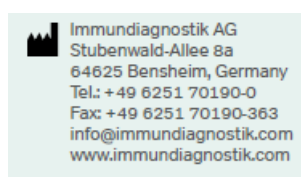

OmicSnap și OmicSnap Meta sunt un sistem complet pentru recoltarea unei cantități definite de materii fecale de către pacienți, care permite stabilizarea și omogenizarea mostrei pentru utilizarea ulterioară în procedee bazate pe acizi nucleici în laborator.

Explicația simbolurilor

	Producător
	Distribuitor
	Diagnostic In-vitro
	Numărul comenzii
	Lotul
	Temperatura de păstrare
	Data de expirare
	A nu se folosi
	Cod identificare dispozitiv

Nu beți lichidul din interiorul flacoanelor de recoltare, evitați contactul direct cu lichidul. În cazul contactului cu pielea, spălați imediat zonele afectate cu apă și săpun. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Spălați/dezinfectați întotdeauna mâinile după colectarea probelor de fecale. Incidentele grave trebuie raportate la autoritățile de supraveghere naționale. Aceste kituri de recoltare au fost fabricate și puse pe piață în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/746 (IVDR).

2. Preluarea probei

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.

Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus. Pentru ridicarea probei este necesar ca dumneavoastră să chemați curierul DHL.


Atenție! Solicitarea curierului se face **NUMAI** în zilele de **LUNI, MARȚI și MIERCURI**, din motive logistice.

Cum chem un curier DHL?

- Pe cutia în care ați primit kitul de recoltare este lipit un AWB pe care veți găsi numărul de indentificare a expedierii (exemplu: WAYBILL: 24 0240 5375).



- Accesați testedebine.ro și apăsați butonul **Cheamă curierul** (dreapta sus).

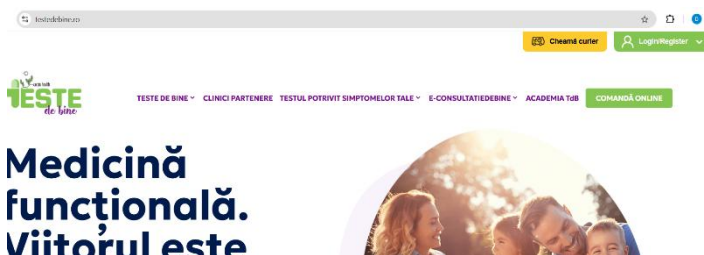

- În fereastra care se deschide completați numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL).
- Selectați data și ora la care doriți să vină curierul. Vă recomandăm să programați curierul începând cu ora 9.00. Țineți cont că DHL are nevoie de minim 2 ore pentru a ridica proba. În funcție de trafic și numărul de comenzi, acest interval poate crește.
- Apasați butonul **SUBMIT PICK DATE AND TIME / CHEAMĂ CURIER**.
- Imediat după ce ați plasat comanda, veți primi o confirmare pe e-mail.
- Pentru a urmări traseul expedierii dvs. puteți accesa www.dhl.com/ro-ro/home/urmarire.html, introducând numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL). Astfel, veți ști, într-un mod simplu, când proba dvs. a fost recepționată de laborator.

Dacă întâmpinați dificultăți, ne puteți contacta la numerele de telefon 0735 303 001 sau 021 267 89 13.