

GI EFFECTS INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE TIMP DE 3 ZILE

RECOLTAREA PROBELOR DE SCAUN PENTRU PACIENȚI



Următoarele teste pot fi recoltate folosind aceste instrucțiuni:

2200 GI Effects *Profil Complet*

2205 GI Effects *Profilul Microbiomului gastrointestinal*

Teste suplimentare disponibile:

- 2130 GI Effects *Testare pentru Campylobacter EIA*
- 2131 GI Effects *Clostridium difficile EIA*
- 2132 GI Effects *Testare pentru Escheriachia EIA*
- 2133 GI Effects *Helicobacter pylori EIA*
- 2134 GI Effects *Lactoferrina fecală*



Este posibil ca proba să nu fie procesată fără aceste informații

FOAIA CU ETICHETE

Notăți pe fiecare etichetă

- **Data nașterii pacientului**
- Atașați și etichetați:
- **TOATE RECIPIENTELE**
 - **Colțul din dreapta sus a Formularului de Recoltare**



FORMULARUL DE RECOLTARE

Vă rugăm să completați:

- **Numele și prenumele pacientului**
- **Data nașterii**
- **Sexul**
- **Data ultimei recoltări**



Specimen

Materii fecale, 6 recipiente (umplute conform instrucțiunilor), ținute la rece

MATERIALE SUPLIMENTARE

- Mănuși de latex de unică folosință (3)
- Băț de lemn
- Foaia cu etichete

MATERIALE PENTRU TRANSPORT

- Tampoane absorbante
- Formular de recoltare
- 3 pungi pentru probe biologice cu buzunar lateral
- Cutia pentru kitul de recoltare

Materiale de recoltare pentru probele de scaun



PAȘI IMPORTANȚI ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL

CU 2-4 SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE
RECOLTARE:



CU 2 ZILE ÎNAINTE DE RECOLTARE



- Vă rugăm să vă consultați cu medicul prescriptor înainte de a opri orice medicament. Anumite medicamente sau suplimente pot influența rezultatul testului.
- Întrerupeți antibioticele, medicamentele antiparazitare și antifungice, probioticele (acidophilus, etc.)
- Întrerupeți tratamentul cu inhibitori de pompa de protoni (IPP) și Bismutul cu **14 zile înainte dacă adăugați și testul pentru H.pylori**
- Întrerupeți aspirina și alte AINS (de ex. Ibuprofenul), supozitoarele rectale, clismele, suplimentele cu cărbune activ, bismutul, betaina HCl, enzimele digestive, medicamentele antiacide laxativele, uleiurile minerale, uleiul de castor, și/sau argila de betonită

Probele pot fi expediate către laboratorul din SUA în zilele de luni, marți sau cel târziu miercuri. Vă rugăm să ne sunați în dimineața în care aveți TOATE cele 6 flacoane cu probe pentru a trimite la dumneavoastră curierul DHL. Pentru a ne anunța vă rugăm să sunați până cel târziu la ora 10.00 la numerele de telefon: 0727 385 380 sau 0735 303 001.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe.

1 **IMPORTANT: Pentru a primi un rezultat corect este OBLIGATORIU să completați corect și complet toate informațiile solicitate pe etichete și pe formularul de recoltare.**

Vezi lista de verificare de pe verso.

ZIUA 1 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE

2 Va puneți mănușile de latex.

3 Colectați specimenul folosind recipientul de colectare inclus în kit. **NU CONTAMINAȚI** specimenul cu urină sau apă din toaletă.



4 Notați **consistența scaunului** (conform graficului de mai jos) pe eticheta flaconului folosind un marker permanent și pe Formularul de recoltare, la rubrica "consistența scaunului".

Consistența specimenului de scaun



Scaun format/normal



Scaun tare/constipat



Scaun moale



Scaun apos/diaree

IMPORTANT:



- Testul nu este recomandat pacienților sub 2 ani
- **NU RECOLTAȚI** atunci când există o hemoragie activă datorată hemoroizilor sau menstruației
- **Așteptați** cel puțin 4 săptămâni de la o colonoscopie sau clismă cu bariu înainte de recoltare
- Recipientele sunt sub presiune. **Acoperiți** capacul flaconului cu un prosop și **îndepărtați** capacul încet. **A NU SE LĂSA FLACOANLE LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.**
- **Evitați** contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii, **clătiți** cu apă timp de 15 minute. În caz de cotact cu pielea, **spălați** bine cu apă și săpun. În caz de ingestie accidentală, **adresați-vă** imediat celui mai apropiat spital.

5

FLACONUL CU CAPAC GALBEN: Îndepărtați capacul. Transferați specimenul de scaun în flacon. **Colectați** din diferite zone ale specimenului. **Amestecați** specimenul cu lichidul din tub până se omogenizează complet. **Asigurați-vă** că lichidul și specimenul nu depășesc linia de marcaj. **NU UMPLEȚI PEA MULT.** Închideți capacul cât mai strâns. **Agitați** tubul timp de 30 de secunde. **NU ÎNGHEȚAȚI PROBA.**



6

Așezați în punga pentru probe biologice și puneți la rece.

7

Aruncați specimenul rămas și recipientul de colectare în mod corespunzător folosind punga neagră de unică folosință.

ZIUA 2 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE

8

Repețați PAȘII de la 2 până la 7 cu al doilea **FLACON CU CAPAC VERDE**



ZIUA 3 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE

9

Repețați PAȘII de la 2 până la 7 cu al treilea **FLACON CU CAPAC VERDE, FLACON CU CAPAC PORTOCALIU, FLACON CU CAPAC ROZ,** și cu **RECIPIENTUL CU CAPAC ALB.** Vă rugăm să notați această data ca fiind data ultimei recoltări pe formularul de recoltare.

SPECIMENUL AMESTECAT ȘI CONSERVATUL **NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ** SĂGEATA ROȘIE



10

Țineți la rece toate flacoanele până în momentul expedierii

Listă de verificare (înainte de expediere)

1. Toate recipientele colectoare

- **Data de naștere a pacientului trebuie să fie trecută pe toate etichetele flacoanelor**
- Specimenul și lichidul **să nu depășească** diversele linii de marcaj
- Toate tuburile și paharul **sunt foarte bine închise**

2. Depozitați-le în frigider în pungă

- **Flacoanele cu capac verde (3) – ETICHETATE**
- **Flacoanele cu capac portocaliu – ETICHETATE**
- **Flacoanele cu capac portocaliu – ETICHETATE**
- **PAHARUL CU CAPAC ALB – ETICHETATE**

3. Formularul de recoltare și plata

- Formularul de recoltare este completat – **Testul este bifat:**
 - **Numele și prenumele pacientului**
 - **Data nașterii**
 - **Sexul**
 - **Data ultimei recoltări**
- **COLȚUL DIN DREAPTA SUS – ETICHETAT**

EXPEDIEREA PROBELOR CATRE LABORATOR

Probele trebuie să fie expediate în cutia kitului de recoltare Genova Diagnostics.
Vă rugăm să consultați instrucțiunile de expediere pe care le găsiți în cutia kitului de recoltare.