


INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE pentru 3 zile

MATERIALE PENTRU RECOLTARE

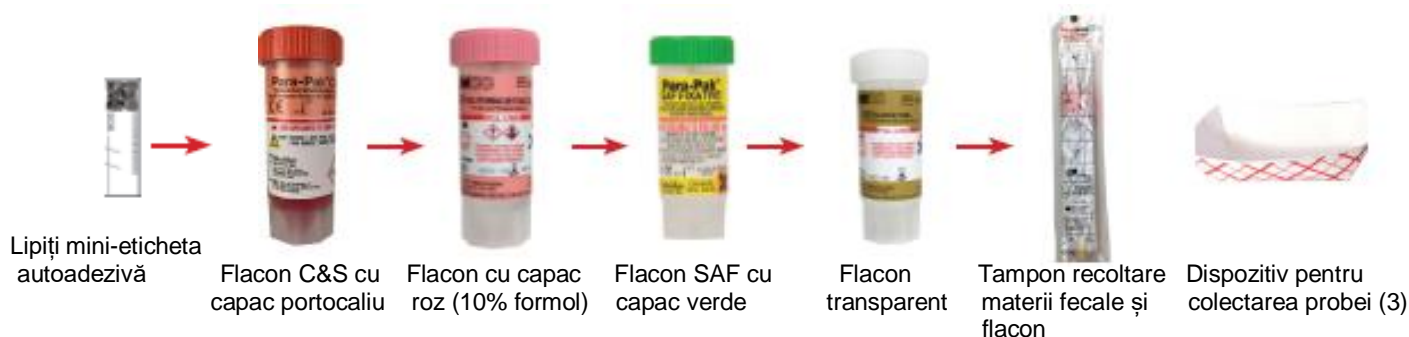

- **ATENȚIE! Flacoanele conțin substanțe toxice. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.**
- Recipientele sunt sub presiune. **Acoperiți** capacul flaconului cu un material textil și **îndepărtați** capacul ușor.
- În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă timp de 15 minute.
- În caz de contact cu pielea, spălați bine cu apă și săpun.
- În caz de ingestie, adresați-vă imediat celui mai apropiat spital.

MATERIALE NECESARE

- Manuși de unică folosință (3) (latex)
- Mini-etichete autoadezive
- Pungi negre de unică folosință
- Pungi pentru probele biologice
- Cutia pentru kitul de recoltare (nu o aruncați)
- Formular de recoltare (requisition form)

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL

- Testul nu este recomandat pacienților sub 2 ani.
- **Așteptați cel puțin 4 săptămâni** de la o colonoscopie sau clismă cu bariu înainte de recoltare.
- Vă rugăm să consultați medicul prescriptor înainte de a opri orice medicament. Anumite medicamente sau suplimente pot influența rezultatul testului.
- **Cu 2-4 săptămâni înainte de recoltare**
 - Întrerupeți antibioticele, medicamentele antiparazitare și antifungice, probioticele (acidophilus, etc.).
 - Întrerupeți tratamentul cu inhibitori de pompa de protoni (IPP) și bismut cu **14 zile înainte dacă adăugați și testul pentru H.pylori.**
- **Cu 2 zile înainte de recoltare**
 - Întrerupeți aspirina și alte AINS (de ex. Ibuprofenul), supozitoarele rectale, clismele, suplimentele cu cărbune activ, bismutul, betaina HCl, enzimele digestive, medicamentele antiacide, laxativele, uleiurile minerale, uleiul de ricin și/sau argila de bentonită.
- **NU RECOLTAȚI** atunci când există o hemoragie activă datorată hemoroizilor sau menstruației.

RECOLTARE

❶ **Formularul de recoltare** (Requisition form) se completează **în a treia zi** de recoltare precizând **data ultimei recoltări, consistența și culoarea specimenului**, în câmpul din colțul din dreapta sus. Bifați apoi în dreptul **numelui testului**: GI Effects Comprehensive Profile #2200, și apoi completați rubrica care solicită **datele pacientului** (câmpul marcat cu verde).

❷ Completați **data de naștere a pacientului** pe **mini-etichetele** autoadezive și **lipiți-le pe fiecare flacon (6)** și **pe tubul cu bețișor**, precum și pe **formularul de recoltare**.

ZIUA 1 DE RECOLTARE

❸ **Puneți-vă** mănușile de latex.

❹ **Colectați** specimenul folosind recipientul de colectare inclus în kit. **NU CONTAMINAȚI** specimenul cu urină sau apă din toaletă.



❺ **FLACONUL CU CAPAC VERDE** din punga marcată ZIUA 1. **Îndepărtați** capacul. **Transferați** specimenul de scaun în flacon. **Colectați** din diferite zone ale specimenului. **Amestecați** ușor specimenul cu lichidul din tub până se omogenizează complet. Umpleți recipientele cât mai **EXACT** până la linia roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o depășească, nici să se afle mult sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați **lichidul din interior**. **Închideți** capacul cât mai strâns. **Agitați** tubul timp de 30 de secunde.



❻ **Completați** pe eticheta de pe flacon numele pacientului, data și ora recoltării, și bifați consistența specimenului. **Puneți recipientul** în punga pentru probe biologice (ZIUA 1) și depozitați-o la rece. Țineți flaconul **la rece** până în momentul expedierii probelor. **NU CONGELAȚI**.



❼ **Aruncați** în toaletă specimenul rămas și apoi la coșul de gunoi recipientul de colectare, utilizând **punga neagră de unică folosință**.

PROBA AMESTECATĂ ȘI
CONSERVANȚII **NU**
TREBUIE SĂ DEPĂȘASCĂ
SĂGEATA ROSIE

ZIUA 2 DE RECOLTARE

❽ **Repetăți** PAȘII de la 3 până la 6 folosind **FLACONUL CU CAPAC VERDE** din punga marcată cu ZIUA 2. Umpleți recipientul cât mai **EXACT** până la linia roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o depășească, nici să se afle mult sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați **lichidul din interior**.

Închideți capacul cât mai strâns. **Agitați** tubul timp de 30 de secunde. **Completați** pe eticheta de pe flacon numele pacientului, data și ora recoltării, și bifați consistența specimenului. **Puneți recipientul** în punga pentru probe biologice (ZIUA 2) și depozitați-o la rece.

❾ **Aruncați** în toaletă specimenul rămas și apoi recipientul de colectare la coșul de gunoi, utilizând **punga neagră de unică folosință**.



ZIUA 3 DE RECOLTARE

10 **Repetati** PAȘII de la 3 până la 6 folosind **FLACONUL CU CAPAC VERDE**, **FLACONUL CU CAPAC PORTOCALIU**, **FLACONUL CU CAPAC ROZ**, și cu **FLACONUL CU CAPAC ALB**, din punga marcată ZIUA 3. Umpleți recipientele cât mai **EXACT** până la linia roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o depășească, nici să se afle mult sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați **lichidul din interior**.

Notă: În **FLACONUL CU CAPAC ALB** nu este lichid.

11 **Deschideți** pachetul cu tamponul (bețișorul) de recoltare, **scoateți** tubul și așezați-l în poziție verticală. Tamponul trebuie să stea în ambalaj până la recoltarea specimenului. →

12 **Prindeți** bețișorul de deasupra marcajului de rupere, adică de capătul opus vârfului aplicator de nylon. (vedeți diagrama de mai jos).

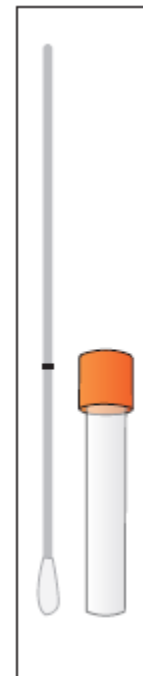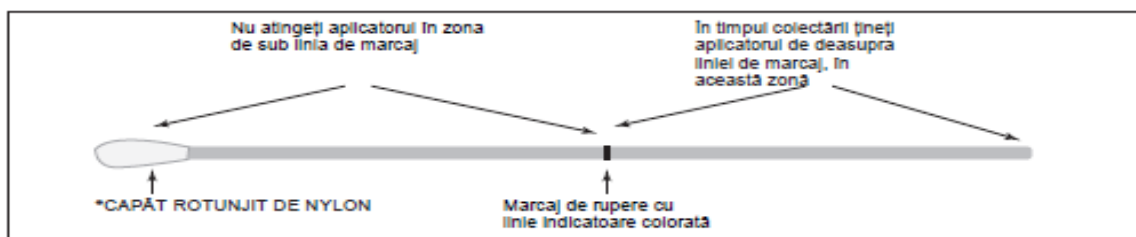

13 **Recoltați** specimenul introducând **CAPUL DE NYLON ROTUNJIT*** (vedeți mai sus) al bețișorului în specimenul de scaun și **roțiți-l. Asigurați-vă** că tamponul conține material fecal. Dacă nu, repetați.

14 **Deschideți** tubul de colectare și introduceți bețișorul. **Mișcați circular** capătul rotunjit de nylon de la capătul bețișorului astfel încât materiile fecale să ajungă pe pereții tubului.

15 **Rupeți** bețișorul de la punctul de rupere, lăsați partea cu capătul rotunjit în tub, iar cealaltă parte aruncați-o. **Puneți** capacul și **închideți-l bine. Agitați** tubul.

16 **Completați formularul de recoltare notând data, consistența** (conform graficului de mai jos), în limba engleză, și **culoarea scaunului DOAR pentru ziua 3 de recoltare**.

Consistența specimenului de scaun



Formed



Hard/Constipated



Loose Stool



Watery/diarrhea

17 **Aruncați** în toaletă specimenul rămas și apoi la coșul gunoi recipientul de colectare, utilizând **punga neagră de unică folosință**.

18 **Completați** pe eticheta de pe flacoane numele pacientului, data și ora recoltării, și bifați consistența specimenului. **Așezați** recipientele în punga pentru probe biologice (marcată ZIUA 3) și puneți la rece până în momentul expedierii probelor, când veți pune **în cutie toate cele trei pungi. NU CONGELAȚI**.

Listă de verificare finală înainte de preluarea probei

Vă rugăm să o parcurgeți cu atenție!

1. Asigurați-vă că toate recipientele sunt **BINE** închise.
2. Ați lipit mini-etichete pe **TOATE** cele 7 recipiente și pe formularul de recoltare, și ați completat data nașterii pacientului pe fiecare dintre ele.
3. Ați completat pe eticheta de pe fiecare recipient **numele** pacientului, **data și ora recoltării**, și ați bifat **consistența specimenului**.
4. Recipientele sunt puse corespunzător **în cele trei pungi** aferente fiecărei zile de recoltare, și așezate înapoi în **cutia** pe care ați primit-o.
5. Ați completat formularul (Requisition form) precizând **data ultimei recoltări**, **consistența și culoarea specimenului**, în câmpul din colțul din dreapta sus.
6. Ați bifat în dreptul numelui testului: GI Effects Comprehensive Profile #2200.
7. Ați completat rubrica care solicită datele pacientului (câmpul marcat cu verde).
8. Ați pus formularul de recoltare în **buzunarul exterior** al cutiei.

PRELUAREA PROBEI

1. Sunați la numerele de telefon **0727.385.380** sau **0735 303 001** pentru a trimite un curier la dvs. acasă să ridice coletul. Din motive logistice, ridicarea probelor se face **NUMAI** în zilele de **luni, marți și miercuri**, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai **înainte de ora 10:00 dimineață**.
2. Veți primi pe e-mail borderoul și AWB-ul expedierii.
3. **Printați** borderoul și AWB-ul expedierii.
4. Introduceți borderoul în buzunarul exterior al cutiei. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât **să nu acoperiți eticheta UN 3373**.