

## UriPep - Determinarea de peptide din gluten și cazeină în urină Instrucțiuni de recoltare și transport

Vă rugăm să citiți cu atenție **instrucțiunile înainte de recoltare** și să vă asigurați că ați respectat fiecare pas.

### Kitul de recoltare conține:


- 1 x Vacutainer Monovette cu vârful;
- 1 x Tub de transport
- 1 x Formular de recoltare
- 1 x Instrucțiuni de recoltare

### Înainte de recoltare

- Nu faceți schimbări de dietă. Mâncați normal cu 2-3 săptămâni înainte de testare.
- Pentru adulți, limitați consumul de apă la maxim 3 pahare de 230 ml cu 24 de ore înainte de recoltare. Nu mai consumați apă după ora 20.00, în seara de dinaintea recoltării.
- **Trebuie recoltată prima urină de dimineață**
- **Nu recoltați urină în timpul menstruației**

### Recoltarea probei

1. Pregătiți echipamentul înainte de recoltare

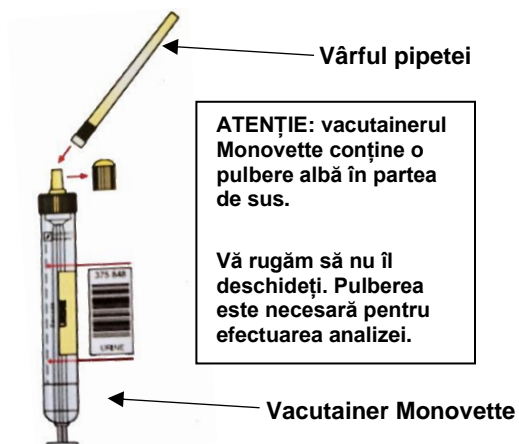

2. Umpleți un recipient steril cu prima urină de dimineață. (acesta nu este inclus în kit)




- Introduceți vârful vacutainerului Monovette în recipientul cu urină și umpleți tubul.



Tubul trebuie umplut cu urină imediat, în maxim 5 minute de la recoltarea urinei, în caz contrar rezultatul testului va fi invalid.

- Îndepărtați vârful și aruncați-l. Puneți capacul vacutainerului.

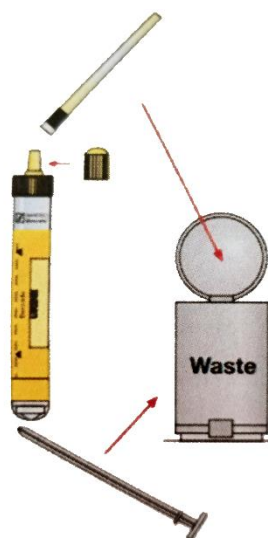

- Amestecați bine urina, prin 5-10 mișcări circulare.

## Preluarea probei

Puneți vacutainerul în tubul de transport.

Puneți tubul de transport împreună cu formularul de recoltare în cutia de transport a kitului de recoltare.

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de urină ambalată conform instrucțiunilor de mai sus, trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.

Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus. Sunați luni, marți sau miercuri, de preferință în intervalul orar 08.00 – 10.00 dimineața, la numerele de telefon **0721 291 108** sau **0735 303 001** pentru a programa trimiterea unui curier care să ridice coletul de la dvs. de acasă.

Din motive logistice, ridicarea probelor se face **NUMAI** în zilele de **luni, marți și miercuri**, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai înainte de ora 10:00 dimineața.

Veți primi pe e-mail AWB-ul expedierii.

Printați AWB-ul expedierii. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât să nu acoperiți eticheta UN3373.