

IBS Complet Profile




Instrucțiuni de recoltare


Kitul de recoltare conține:

- 1 x Formular de recoltare
- 1 x Instrucțiuni de recoltare
- 1 x Flacon special pentru recoltare
- 1 x Hârtie colectoare pentru proba de scaun
- 1 x Tub pentru transport
- 1 x Pungă pentru transport

SCANEAZĂ PENTRU INSTRUCȚIUNI DE
RECOLTARE VIDEO

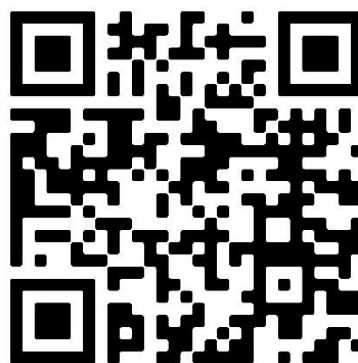

Componentele flaconului de recoltare:

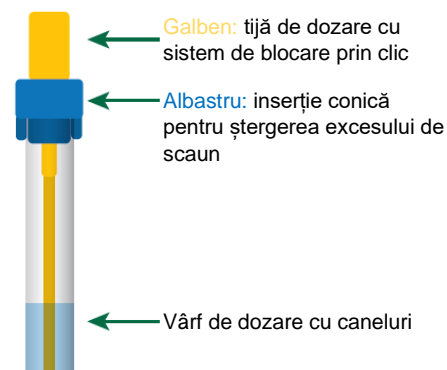

Mod de utilizare al flaconului pentru recoltarea scaunului: (Vezi Fig. 1)

1. Scoateți tija de recoltare din flacon

Țineți flaconul pentru recoltare de **inserția conică albastră (inserția conică albastră rămâne fixată pe flaconul de recoltare)**. Apoi deșurubați cu grijă tija galbenă și scoateți-o din tub. **Nu vărsați lichidul din flaconul de recoltare al probei!**

2. Recoltați proba de scaun

Introduceți tija de recoltare în **3 locuri** diferite ale probei. Canelurile din vârful tije trebuie să fie umplute cu probă.

3. Puneți tija înapoi în flacon

Introduceți tija cu proba de scaun recoltată înapoi în flacon **o singură dată** și nu **o mai scoateți**. Curățați scaunul în exces de la deschiderea îngustă a inserției conice albastre.

Vă rugăm să rețineți: numai această cantitate mică și definită de scaun de pe tija de dozare poate pătrunde în interiorul flaconului.

4. Închideți flaconul cu proba

Răsuciți tija astfel până când sistemul de închidere face un clic zgomotos.

Vă rugăm să rețineți: Soluția stabilizatoare din interiorul flaconului își schimbă greu culoarea. Totuși dacă scoateți și introduceți tija de mai multe ori în flacon, soluția stabilizatoare va deveni maro din cauza unui volum prea mare de proba de scaun. **În acest caz proba nu va mai putea fi analizată sau există posibilitatea unui rezultat fals-pozitiv!**

5. Ambalare

Vă rugăm să puneți flaconul în tubul de transport negru inclus în kit. Tubul de transport împreună cu formularul de recoltare trebuie puse în punga verde de transport probe biologice. Sigilați punga, puneți-o în cutia de transport a kitului de recoltare și închideți cutia.

6. Preluarea probei

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.

Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus, sunați luni, marți sau miercuri, de preferință în intervalul orar 08.00 – 10.00 dimineața, la numerele de telefon 021 267 89 13 sau 0735 303 001 pentru a programa trimiterea unui curier la dvs. acasă, să ridice coletul.

Din motive logistice, ridicarea probelor se face **NUMAI** în zilele de luni, marți și miercuri, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai înainte de ora 10:00 dimineață.

Veți primi pe e-mail borderoul și AWB-ul expedierii.

Printați borderoul și AWB-ul expedierii. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât să nu acoperiți eticheta UN3373.

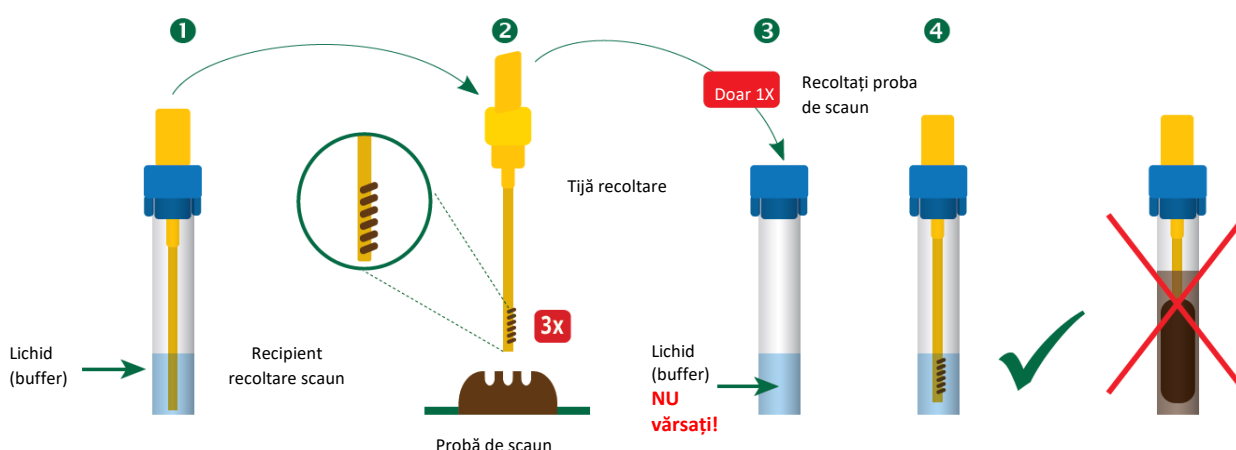


Fig. 1 Mod de utilizare al flaconului pentru recoltarea scaunului