

## METHYLATION PANEL INTRUCȚIUNI DE RECOLTARE CLINICI (SÂNGE VENOS)

### MATERIALE PENTRU RECOLTARE

- 1 vacutainer de 4 ml K3-EDTA cu capac de culoarea lavandei;
- 1 vacutainer de 6 ml K3-EDTA cu capac de culoarea lavandei;
- 1 flacon neutru;
- 1 element de răcire care trebuie pus la congelator pentru cel puțin 24 de ore;
- Formular de laborator – Patient Questionnaire – care trebuie completat în totalitate de pacient;
- Formular de recoltare în limba engleză – Requisition Form;
- Mini-etichete autoadezive pentru a completa data nașterii și data recoltării.

### CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL

- **Recoltarea se face dimineața, pe nemâncate. Pacientul nu trebuie să fi consumat alimente cu 12 ore înainte de recoltarea de sange. În noaptea dinaintea recoltării se poate consuma doar apă.**

### RECOLTARE DE SÂNGE VENOS

Cu 24 de ore înainte de recoltare puneți elementul frigorific la congelator.


1. Notați pe etichetele autoadezive data nașterii pacientului și data recoltării.
2. Recoltați sânge venos și prelucrați probele conform graficului de mai jos.

FLACOANE	PRELUCRARE	ETICHETARE ȘI TRANSPORT
<p>Vacutainer de 4 ml K3-EDTA cu capac de culoarea lavandei</p>	<p><b>Întoarceți ușor</b> flaconul de 5 ori. <b>Nu îl agitați!</b></p>	<p>Lipiți mini-eticheta autoadezivă pe flacon și puneți la frigider.</p> <p><b>REFRIGERATE</b></p>
<p>Vacutainer de 6 ml K3-EDTA cu capac de culoarea lavandei</p> <p>Flacon de Transport</p>	<p><b>Întoarceți ușor</b> flaconul de 10-15 ori Centrifugați-l 15 minute la 3000 RPM <b>Transferați</b> plasma în flaconul de transport <b>Aruncați flaconul folosit!</b></p>	<p>Lipiți mini-eticheta autoadezivă pe flacon și congelați timp de 24 de ore.</p> <p><b>FREEZE</b></p>

## Listă de verificare finală înainte de predarea probei de sânge venos

### Vă rugăm să o parcurgeți cu atenție!

1. Asigurați-vă că fiecare flacon are lipită o mini-etichetă cu data nașterii pacientului și data recoltării completate.
2. Puneți flacoanele cu sânge și ser în punga de transport probe biologice.
3. Puneți elementul frigorific congelat împreună cu punga de transport probe biologice în cutia albă.
4. În cazul în care pacientul a comandat și a recoltat salivă, asigurați-vă că plicul cu probele este închis și are atașată o mini-etichetă completată. Puneți apoi plicul în spatele cutiei albe, în interiorul cutiei de transport albastre.
5. Pacientul a completat chestionarul Patient Questionnaire și l-a pus în cutie.
6. Pacientul a completat formularul (Requisition form) precizând data recoltării, în câmpul din colțul din dreapta sus și a completat rubrica care solicită datele pacientului (câmpul marcat cu verde).
7. Ați bifat în dreptul numelui testului: Methylation Panel #3534 și Methylation Genomics Add-on #3535 (în cazul recoltării de salivă).
8. Ați pus formularul de recoltare în cutie.

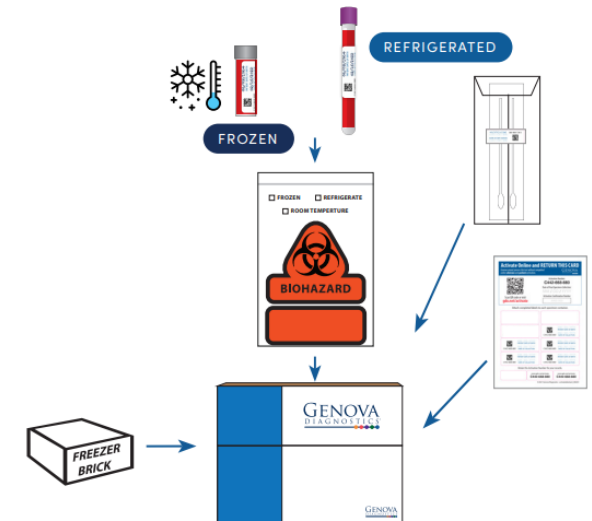

### PRELUAREA PROBEI

1. Sunați la numerele de telefon 021 267 89 13 sau 0735.303.001 pentru a trimite un curier să ridice coletul. Din motive logistice, ridicarea probelor se face **NUMAI** în zilele de luni, marți și miercuri, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai înainte de ora 10:00 dimineață.
2. Veți primi pe e-mail borderoul și AWB-ul expedierii ce trebuie printate. Borderoul se pune în interiorul cutiei, iar AWB-ul trebuie lipit pe cutie astfel încât să nu acoperiți etichera cu însemnele UN3373.