

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE ȘI TRANSPORT

FlorInScan și FlorInScan Plus



IMPORTANT

- Nu se recomandă modificări de dietă înainte de testare.
- Flaconul se umple doar 3/4, până unde indică săgeata albastră de pe etichetă.
- Proba de scaun trebuie păstrată la rece (în frigider) până la sosirea curierului
- Curierul va transporta proba la temperatură ambientală și aceasta trebuie recepționată de către laborator în maxim 48 de ore de la recoltare.
- Nu expediați probe în week-end; vă recomandăm să programați expedierea probei pentru zilele de luni, marți sau, cel târziu, miercuri.
- Evitați temperaturile extreme.

CONȚINUTUL KITULUI:

- flacon cu capac maroniu;
- hârtie colectoare pentru proba de scaun care se plasează pe capacul vasului de toaletă;
- pungă pentru transport cu material absorbant inclus;
- formular de recoltare;

**PĂSTRAȚI CUTIA KITULUI PENTRU
TRANSPORTUL PROBEI LA LABORATOR!**










38, rue Hiehl · Z.A.C. Laangwiss · L-6131 Junglinster
Tel: +352 780 290-1 · Fax +352 788 894 · contact@labo.lu
www.labo.lu

LABORATOIRES RÉUNIS

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE ȘI TRANSPORT

1. Fixați hârtia colectoare pe capacul vasului de toaletă. Așezați-vă pentru a colecta proba de scaun în această hârtie. Proba nu trebuie să se amestece cu urină sau apă.
2. Deșurubați capacul. Cu ajutorul spatulei de plastic atașate de capac, umpleți flaconul până unde indică săgeata albastră de pe etichetă.
3. Reînșurubați cu atenție capacul flaconului. Flaconul trebuie umplut doar 3/4.
4. Scrieți numele și data recoltării pe flacon.
5. Introduceți formularul completat în cutia de transport.
6. Introduceți flaconul în pungă și sigilați-o îndepărtând banda adezivă din partea superioară.
7. Proba ambalată conform instrucțiunilor de mai sus se pune înapoi în cutia pe care ați primit-o, și se sigilează.

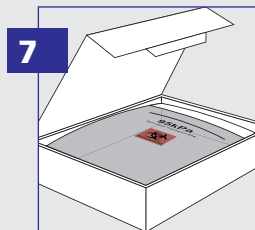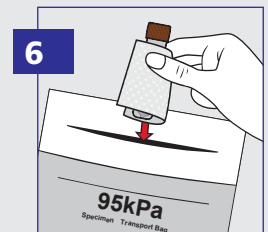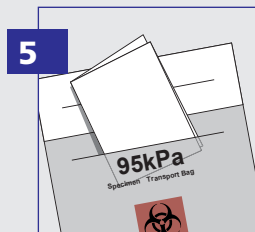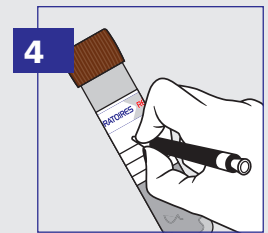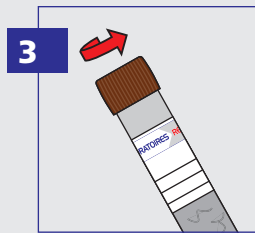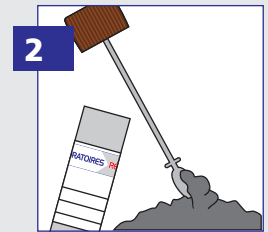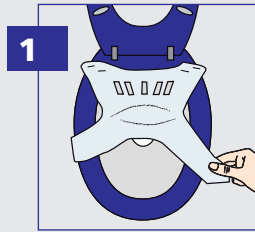

DEPOZITAREA PROBEI

Flaconul cu proba trebuie păstrat la rece, în frigider, până în momentul expedierii. Intervalul de stabilitate a probei este de maxim 48 de ore.

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE ȘI TRANSPORT

TRANSPORTUL PROBEI

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.


Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus. Pentru ridicarea probei este necesar ca dumneavoastră să chemați curierul DHL. Atenție! Solicitarea curierului se face **NUMAI** în zilele de **LUNI, MARȚI și MIERCURI**, din motive logistice.

Cum chem un curier DHL?

- Pe cutia în care ați primit kitul de recoltare este lipit un AWB pe care veți găsi numărul de indentificare a expedierii (exemplu: WAYBILL: 24 0240 5375)

MEDICAL EXPRESS CMX DHL
From: CLINICII HEALTH SRL
Dorota Lukša
Șosea Eroilor Sanitari 33E
București
077100 Voluntari
ROMANIA
To: Laboratoires Reunis Luxembourg S.A.
Laboratoires Reunis Luxembourg S.A.
38 Rue Hiehl Z.A.C Laangwiss
6131 Junglinster
LUXEMBOURG
Origin: BUH
Contact: 0735302001
Contact: 00352 710 200 1
reun@reunis.com
LU-LUX-GTW LULC
RDS-ADI
Qty: 13 X12
Ref No: 3654673
Content: UN3373 Biological Samples Catag B
0.5 kg 1 / 1
UN3373 Biological Samples Catag B
WAYBILL: 24 0240 5375
(LU) LULC 131-0300000
Ref Code: 3654673
(J) J001: 4600 0119 3912 0169

- Accesați testedebine.ro și apăsați butonul Cheamă curierul (dreapta sus)

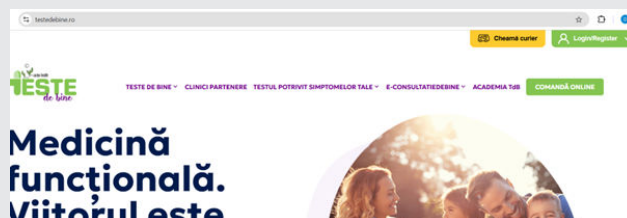

- În fereastra care se deschide completați numărul de identificare a expedierii (WAYBILL)
- Selectați data și ora la care doriți să vină curierul. Vă recomandăm să programați curierul începând cu ora 9.00. Țineți cont că DHL are nevoie de minim 2 ore pentru a ridica proba. În funcție de trafic și numărul de comenzi, acest interval poate crește.
- Apasați butonul SUBMIT PICK DATE AND TIME / CHEAMĂ CURIER
- Imediat după ce ați plasat comanda, veți primi o confirmare pe e-mail
- Pentru a urmări traseul expedierii dvs. puteți accesa www.dhl.com/ro-ro/home/urmarire.html introducând numărul de identificare a expedierii (WAYBILL). Astfel, veți ști, într-un mod simplu, când proba dvs. a fost recepționată de laborator.

Dacă întâmpinați dificultăți, ne puteți contacta la numerele de telefon 0735 303 001 sau 021 267 89 13.