

Vaginal Microbiome

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE ȘI TRANSPORT

Kitul de recoltare conține:

- Dispozitiv pentru recoltarea probei
- Formular de comandă
- Pungă verde pentru transport de probe biologice

Dispozitivul pentru recoltarea probei

Evalyn Brush este un dispozitiv medical steril cu ajutorul căruia se face prelevarea probei pentru testul **Vaginal Microbiome**. Este special conceput pentru recoltarea de material celular vaginal, acasă, fără a fi nevoie de asistență medicală.

Recoltarea probei se face printr-un proces simplu, fără a provoca un disconfort major. Pentru o recoltare corectă, parcurgeți cu ATENȚIE pași de pe verso.



INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE RECOLTARE

- **NU** folosiți dispozitivul *Evalyn Brush* dacă:
 - ambalajul dispozitivului este deteriorat;
 - dispozitivul este expirat (verifică data expirării);
 - sunteți în timpul menstruației;
- **NU** folosiți alte produse vaginale cu cel puțin două zile înainte de recoltare.
- **NU** există interdicție pentru contraceptive vaginale, prezervative sau lubrifianți pe bază de apă.
- Dispozitivul este de unică folosință.
- **NU** refolosiți dispozitivul pentru că există riscul de infecții și/sau diagnostic greșit.
- Dacă sunteți însărcinată sau ați născut în ultimele 3 luni, solicitați asistența medicului ginecolog pentru recoltare.

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE



Spălați-vă pe mâini înainte de a folosi dispozitivul.



Scoateți dispozitivul *Evalyn Brush* din ambalaj. **NU** aruncați ambalajul. Îl veți folosi pentru a ambala dispozitivul cu proba recoltată, pentru a-l trimite la laborator.




Apăsați pe părțile laterale ale capacului roz, cu ajutorul degetului mare și al arătătorului, pentru a îndepărta capacul roz al dispozitivului. Asigurați-vă că nu atingeți pensula albă cu mâinile!



Recoltați proba stând în picioare. Așezați-vă într-o poziție confortabilă (ca și cum a-ți introduce un tampon).



Îndepărtați labiile cu o mână, iar cu cealaltă introduceți dispozitivul în vagin, până ce aripioarele ating labiile.

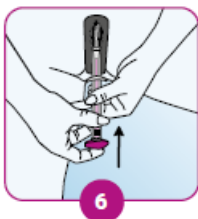

Cu o mână țineți dispozitivul de carcasa transparentă, iar cu cealaltă mână împingeți pistonul roz în carcasa transparentă. Veți auzi și simți un click când pensula ajunge în poziția corectă și pistonul a fost inserat complet în carcasă.



Rotiți pistonul de 5 ori în aceeași direcție. După fiecare rotație, veți auzi un click. Astfel vă va fi ușor să contorizați numărul de rotații. După ce ați rotit pistonul de 5 ori, scoateți dispozitivul cu grijă.



Țineți cu o mână carcasa transparentă, iar cu cealaltă mână, trageți de pistonul roz, până ce pensula albă dispare în carcasă. În tot acest timp, **NU** atingeți partea superioară a dispozitivului (deasupra aripioarelor).




Țineți dispozitivul de capătul carcasei transparente pentru a vă asigura că pensula albă nu iese din dispozitiv. Puneți capacul roz înapoi pe dispozitiv folosindu-vă de degetul mare și de index. Veți auzi un click când este închis corespunzător.



Puneți dispozitivul înapoi în ambalaj.



Puneți ambalajul cu dispozitivul în punga de plastic inclusă în kit și sigilați-o.

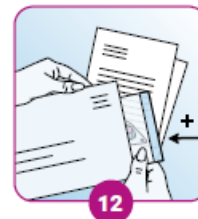

Puneți punga de plastic și formularul de recoltare în punga verde de transport pentru probe biologice. Sigilați-o, puneți-o în cutia de transport a kitului și închideți cutia.

INFORMAȚII IMPORTANTE DUPĂ RECOLTARE

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.


Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus. Pentru ridicarea probei este necesar ca dumneavoastră să chemați curierul DHL. Atenție! Solicitarea curierului se face **NUMAI** în zilele de **LUNI, MARȚI și MIERCURI**, din motive logistice.

Cum chem un curier DHL?

- Pe cutia în care ați primit kitul de recoltare este lipit un AWB pe care veți găsi numărul de indentificare a expedierii (exemplu: WAYBILL: 24 0240 5375)



- Accesați testedebine.ro și apăsați butonul **Cheamă curierul** (dreapta sus)

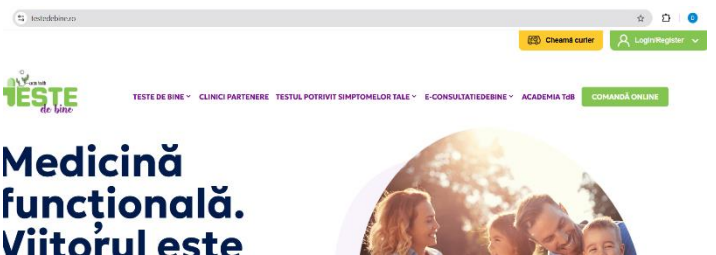

- În fereastra care se deschide completați numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL)
- Selectați data și ora la care doriți să vină curierul. Vă recomandăm să programați curierul începând cu ora 9.00. Țineți cont că DHL are nevoie de minim 2 ore pentru a ridica proba. În funcție de trafic și numărul de comenzi, acest interval poate crește.
- Apasați butonul SUBMIT PICK DATE AND TIME / CHEAMĂ CURIER
- Imediat după ce ați plasat comanda, veți primi o confirmare pe e-mail
- Pentru a urmări traseul expedierii dvs. puteți accesa www.dhl.com/ro-ro/home/urmarire.html, introducând numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL). Astfel, veți ști, într-un mod simplu, când proba dvs. a fost recepționată de laborator.

Dacă întâmpinați dificultăți, ne puteți contacta la numerele de telefon 0735 303 001 sau 021 267 89 13.