

## IBS Complet Profile



### Instrucțiuni de recoltare


#### Kitul de recoltare conține:

- 1 x Formular de recoltare
- 1 x Instrucțiuni de recoltare
- 1 x Flacon special pentru recoltare
- 1 x Hârtie colectoare pentru proba de scaun
- 1 x Tub pentru transport
- 1 x Pungă pentru transport

#### SCANEAZĂ PENTRU INSTRUCȚIUNI DE

#### RECOLTARE VIDEO

#### Componentele flaconului de recoltare:

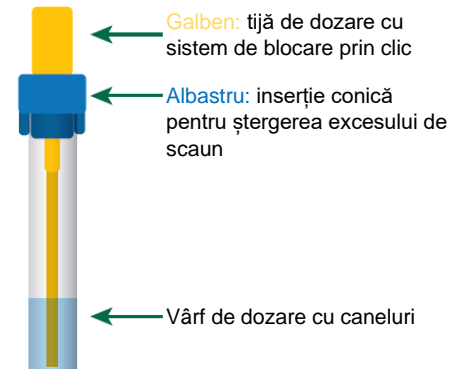

#### Mod de utilizare al flaconului pentru recoltarea scaunului: (Vezi Fig. 1)

##### 1. Scoateți tija de recoltare din flacon

Țineți flaconul pentru recoltare de **inserția conică albastră (inserția conică albastră rămâne fixată pe flaconul de recoltare)**. Apoi deșurubați cu grijă **tija galbenă** și scoateți-o din tub. **Nu vărsați lichidul din flaconul de recoltare al probei!**

##### 2. Recoltați proba de scaun

Introduceți tija de recoltare în **3 locuri** diferite ale probei. Canelurile din vârful tije trebuie să fie umplute cu probă.

##### 3. Puneți tija înapoi în flacon

Introduceți tija cu proba de scaun recoltată înapoi în flacon **o singură dată** și nu **o mai scoateți**. Curățați scaunul în exces de la deschiderea îngustă a inserției conice albastre.

**Vă rugăm să rețineți:** numai această cantitate mică și definită de scaun de pe tija de dozare poate pătrunde în interiorul flaconului.

#### 4. Închideți flaconul cu proba

Răsuciți tija astfel până când sistemul de închidere face un clic zgomotos.

**Vă rugăm să rețineți: Soluția stabilizatoare din interiorul flaconului își schimbă greu culoarea.** Totuși dacă scoateți și introduceți tija de mai multe ori în flacon, soluția stabilizatoare va deveni maro din cauza unui volum prea mare de proba de scaun. **În acest caz proba nu va mai putea fi analizată sau există posibilitatea unui rezultat fals-pozitiv!**

#### 5. Ambalare

Vă rugăm să puneți flaconul în tubul de transport negru inclus în kit. Tubul de transport împreună cu formularul de recoltare trebuie puse în punga verde de transport probe biologice. Sigilați punga, puneți-o în cutia de transport a kitului de recoltare și închideți cutia.

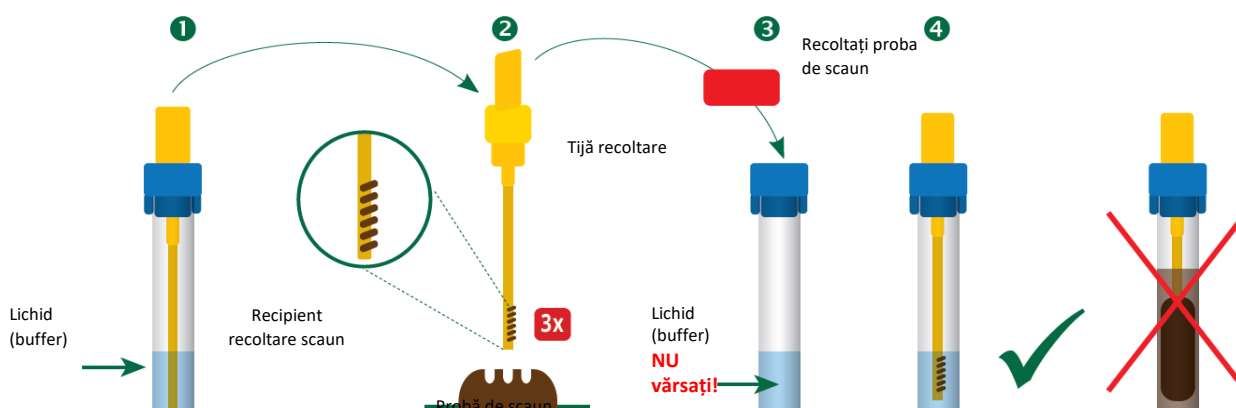


Fig. 1 Mod de utilizare al flaconului pentru recoltarea scaunului

## Preluarea probei

Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.


Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de mai sus. Pentru ridicarea probei este necesar ca dumneavoastră să chemați curierul DHL. Atenție! Solicitarea curierului se face **NUMAI** în zilele de **LUNI, MARȚI și MIERCURI**, din motive logistice.

## Cum chem un curier DHL?

- Pe cutia în care ați primit kitul de recoltare este lipit un AWB pe care veți găsi numărul de indentificare a expedierii (exemplu: WAYBILL: 24 0240 5375)



- Accesați [testedebine.ro](http://testedebine.ro) și apăsați butonul **Cheamă curierul** (dreapta sus)

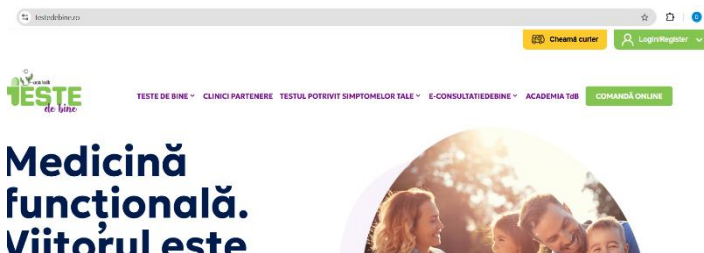

- În fereastra care se deschide completați numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL)
- Selectați data și ora la care doriți să vină curierul. Vă recomandăm să programați curierul începând cu ora 9.00. Țineți cont că DHL are nevoie de minim 2 ore pentru a ridica proba. În funcție de trafic și numărul de comenzi, acest interval poate crește.
- Apasați butonul SUBMIT PICK DATE AND TIME / CHEAMĂ CURIER
- Imediat după ce ați plasat comanda, veți primi o confirmare pe e-mail
- Pentru a urmări traseul experidierii dvs. puteți accesa [www.dhl.com/ro-ro/home/urmarire.html](http://www.dhl.com/ro-ro/home/urmarire.html), introducând numărul de indentificare a expedierii (WAYBILL). Astfel, veți ști, într-un mod simplu, când proba dvs. a fost recepționată de laborator.

Dacă întâmpinați dificultăți, ne puteți contacta la numerele de telefon 0735 303 001 sau 021 267 89 13.

